

SiLL-Ha 初期設定ガイド

この度は、唾液検査システム SiLL-Ha を弊社ホームページよりお申し込みいただきありがとうございました。SiLL-Ha の初期設定は5分ほどの簡単な操作で完了いたします。以下の流れで対応いただき、完了しましたら連携設定をいたしますので、プラネットカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

SiLL-Ha は医院スタッフの皆様で簡単な3つのステップで初期設定が可能です。

【初期設定に必要なもの】

SiLL-Ha (機器)・ソフトウェア USB メモリ (箱に同梱)・USB ケーブル (箱に同梱)・Dental X がインストールされた Mac (クライアント機を推奨しています)

初期設定・操作の詳細は
動画でご紹介しています。

SiLL-Ha の初期設定



SiLL-Ha の操作



Step.1 ソフトを Mac にインストールします

同梱の USB メモリをポートに差して、インストーラーをクリックしながら進めます。

Step.2 機器と Mac (&プリンタ) を接続します

同梱の USB ケーブルで機器と Mac をつなぎ、電源の入り切りをしてお互いを認識させます。

Step.3 医院名・医師名を登録します

Mac のアプリを操作して、医院名・医師名を登録します。

接続と初期設定が完了したら、いよいよ Dental X との連携設定です。
カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。弊社スタッフが連携作業を完了します。

プラネットカスタマーサービスセンター



0120-803001

連携のご連絡は平日 (月～金) 10:00～18:00 までお願いいたします。

以上で、初期設定は終了です。

SiLL-Ha を使って患者さんとの新しいコミュニケーションの形を体験してください。

SiLL-Ha に関するセミナーも開催しています。 [🔍 プラネット セミナー](#)